

## Kippschutzräder für ergoflix® LX 5.0 und ergoflix® carbon Montageanleitung



Die Kippschutzräder bieten noch mehr Sicherheit beim Überwinden von Hindernissen oder beim Befestigen einer Tasche am Schiebebügel.

Optional kann die Montage bei einem Fachhandelspartner oder durch den ergoflix-Kundenservice gegen Aufpreis beauftragt werden.

**Gut zu wissen:** Du benötigst den Inbusschlüssel der Größe 4 und Größe 5.



## WARNUNG

### Beschädigung der Rückenlehne bei starker Gewichtsbelastung

Vermeide eine starke Belastung der Rückenlehne des Rollstuhls durch ein erhöhtes Gewicht. Achte bei gefüllten Taschen und Rucksäcken darauf, dass diese nicht mehr als 5 kg Gewicht haben. Eine zu schwere Gewichtsbelastung kann die Rückenlehne ernsthaft verformen und beschädigen.

## Und so geht's

Löse zunächst die Schrauben (s. Abb. 1), die sich am linken Motorblock befinden, mit dem Inbusschlüssel und verwahre diese. Entferne die Unterlegscheibe von der soeben entnommenen Schraube und setze diese an die mitgelieferte kürzere Schraube an (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Lösen der Schrauben



Abbildung 2: Ansetzen der Unterlegscheibe

Setze den Kippschutz für die linke Seite auf die beiden Schraublöcher (s. Abb. 3) und führe die kürzere Schraube mit Unterlegscheibe in das obere Schraubloch ein und ziehe sie mit dem Inbus Größe 4 leicht an (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Aufsetzen des Kippschutzes



Abbildung 4: Einsetzen der oberen Schraube

Setze eine weitere Unterlegscheibe an die mitgelieferte längere Schraube an (s. Abb. 5) und setze diese in das untere Schraubloch ein. Ziehe auch diese Schraube zunächst leicht an und danach ganz fest (s. Abb.6). Ziehe nun auch die zuvor leicht angezogene, obere Schraube fest an.



Abbildung 5: Ansetzen der Unterlegscheibe



Abbildung 6: Festziehen der Schrauben

Nun steht auf der Außenseite des Motors ein Stück der unteren Schraube raus (s. Abb. 7) – schraube eine der mitgelieferten Muttern auf das Gewinde (s. Abb. 8). Wiederhole den kompletten Vorgang anschließend für die rechte Seite.



Abbildung 7: Herausstehendes Gewinde



Abbildung 8: Angebrachte Mutter

Der Kippschutz wurde erfolgreich montiert (s. Abb. 9).



Abbildung 9: Fertig montierter Kippschutz

## **ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20  
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

### **Telefonische Servicezeiten**

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Besuche uns auf Social Media



**Bitte beachte:** Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter [www.ergoflix.de](http://www.ergoflix.de).

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.  
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



202601-07