

# ergoflix

**Rollstuhlrucksack • Sac à dos pour fauteuil roulant**  
**Montageanleitung • Guide de montage**



[ergoflix.de](http://ergoflix.de) | [ergoflix.fr](http://ergoflix.fr)

Mit Hilfe des Rollstuhlrucksacks hast Du genug Stauraum für Deine persönlichen Sachen.

**Gut zu wissen:** Der Rollstuhlrucksack ist mit wenigen Handgriffen sicher an Deinem Rollstuhl angebracht. Dieser kann als Rucksack, an den oberen kleinen Henkeln oder als Schultertasche getragen werden.



## Und so geht's

Greife die Überwurflasche und ziehe diese nach vorn (s. Abb. 1), bis sie sich vollständig ausgefaltet hat (s. Abb. 2). Übrigens: Die Überwurflasche des Rollstuhlrucksacks wird durch Magnete zusammengehalten.



Abbildung 1: Entfalten der Überwurflasche

Abbildung 2: Ausgefaltete Überwurflasche

Greife die Überwurfflasche an beiden Seiten und stülpe diese über die Rückenlehne Deines Rollstuhls (s. Abb. 3). Ziehe den Rollstuhlrucksack runter zum Rückenlehnenüberzug bis die Überwurfflasche die Gelenkpunkte der Armlehne erreicht. Der Rollstuhlrucksack ist nun fertig montiert (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Überstülpen der Überwurfflasche



Abbildung 4: Fertig montierter Rucksack

Der Rollstuhlrucksack bietet Dir neben einem Fach für Dein Lieblingsgetränk auch ein Laptopfach und genügend Stauraum für alles, was Du unterwegs benötigst (s. Abb. 5). Außerdem findest Du seitlich am Rückenteil ein verstecktes Fach, welches perfekt für dein Portemonnaie, Smartphone und sonstige Wertsachen geeignet ist (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Getränke- und Laptopfach



Abbildung 6: Seitenfach

Um den Rollstuhlrucksack zu demontieren, ziehe ihn einfach wieder von der Rückenlehne. Klappe danach die Lasche ein, damit diese nicht beim Tragen stört. Falte dazu die beiden Außenseiten nach innen (s. Abb. 7). Die in der Lasche integrierten Magnete erledigen den Rest, indem sie sich anziehen. Nun kannst Du die Überwurfflasche zusammengefaltet an den Rollstuhlrucksack drücken (s. Abb. 8).



Grâce au sac à dos pour fauteuil roulant, vous disposez de suffisamment d'espace de rangement pour vos affaires personnelles.

**Bon à savoir :** le sac à dos pour fauteuil roulant s'installe facilement et en toute sécurité sur votre fauteuil roulant. Ce sac peut être utilisé de trois façons différentes : porté sur le dos comme un sac à dos, tenu par les petites poignées supérieures, ou porté en bandoulière.



## Voici les étapes pour le montage :

Prenez le rabat du sac et tirez-le vers l'avant (voir fig. 1), jusqu'à ce que le rabat soit complètement déplié (voir fig. 2). À noter : le rabat du sac à dos pour fauteuil roulant est maintenu en place par des aimants.



Figure 1 : Dépliage du rabat



Figure 2 : Rabat complètement déplié

Prenez le rabat des deux côtés et placez-le sur le dossier de votre fauteuil roulant (voir fig. 3). Faites glisser le sac à dos pour fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le revêtement du dossier. Le sac à dos pour fauteuil roulant est maintenant correctement installé (voir fig. 4).



Figure 3 : Placement du rabat sur le dossier



Figure 4 : Sac à dos correctement installé

Le sac à dos pour fauteuil roulant vous offre, en plus d'un compartiment pour votre boisson préférée, une poche pour ordinateur portable et suffisamment d'espace de rangement pour tout ce dont vous avez besoin lors de vos déplacements (voir fig. 5). Sur le côté, vous trouverez également un compartiment latéral, idéal pour votre portefeuille, smartphone et autres objets de valeur (voir fig. 6).



Figure 5 : Compartiment pour bouteille et pour ordinateur portable



Figure 6 : Compartiment latéral

Pour démonter le sac à dos pour fauteuil roulant, il vous suffit de le retirer du dossier. Repliez ensuite le rabat pour qu'il ne gêne pas lors du transport. Pour ce faire, pliez les deux côtés vers l'intérieur (voir fig. 7). Les aimants se fixent automatiquement. Vous pouvez maintenant appuyer le rabat replié contre le sac à dos pour fauteuil roulant (voir fig. 8).



Figure 7 : Pliage du rabat



Figure 8 : Appui du rabat

*Veillez noter que le sac à dos pour fauteuil roulant doit être utilisé uniquement en combinaison avec les roulettes anti-bascule et que le poids maximal de la charge est de 10 kg.*

**Vos notes :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20  
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

### **ergoflix France SAS**

6 rue d'Arsonval  
Batiment B3  
69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

### **Telefonische Servicezeiten**

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

### **Horaires d'ouverture**

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Juli 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.  
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: juillet 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.