

Anti-Dekubituskissen

Bedienungsanleitung



Unser Druckentlastungskissen ist ein komfortables Rollstuhlkissen mit Luftzellen. Dies sorgt für höchste Sitzqualität und trägt zu einer Verbesserung Ihrer Sitzposition sowie zur Dekubitus-Prophylaxe bei. Durch die mitgelieferte Handluftpumpe können Sie den Luftdruck individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der Bezug ist rutschfest und kann bei Bedarf gewaschen werden. Wie Sie das Anti-Dekubituskissen auf Ihre Bedürfnisse anpassen können, erklären wir Ihnen in unserem Montage-Guide.

Lieferumfang:

1. Kissen
2. Bezug
3. Luftpumpe mit Luftdruckventil

Warnhinweise:

Für einen optimalen Gebrauch des Anti – Dekubituskissens sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- **Luftdruckprüfung:** Mindestens einmal täglich.
- **Hautkontrolle:** Kontrollieren Sie die Haut regelmäßig, mindestens einmal täglich. Der Abbau von Haut und Weichgewebe kann aus vielen Gründen auftreten, die von Person zu Person variieren können. Rötungen, Bluter-güsse oder verfärbte Haut können auf den Beginn von Weichgewebe- oder Hautschädigungen hinweisen. Wenn dies auftritt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- **Kissen- und Bezugsausrichtung:** Das Kissen muss mit den Luftkammern nach oben verwendet werden. Wenn das Kissen nicht nach oben zeigt oder der Bezug nicht richtig verwendet wird, kann dies die Vorteile des Kissens verringern oder aufheben und das Risiko für Haut und anderes Weichgewebe erhöhen.
- **Unterluftdruck:** VERWENDEN SIE KEIN Kissen mit zu wenig Luftdruck. Unzureichendes Aufblasen oder Luftverlust des Kissens kann zu mangelnder Körperunterstützung führen. Es ist wichtig, dass Sie in das Kissen eintauchen, aber nicht auf dem Boden oder der Oberfläche des Kissens ruhen, da dies zu Druckspitzen führen kann. Länger andauernde Einwirkungen durch Ober- oder Unterdruck kann das Risiko einer Schädigung der Haut und des Weichgewebes erhöhen.
- **Oberluftdruck:** VERWENDEN SIE KEIN Kissen mit zu viel Luftdruck. Wenn das Kissen für den täglichen Gebrauch zu stark aufgeblasen bleibt, taucht der Körper nicht in die Luftkammern ein, was die Vorteile des Produkts verringern oder eliminieren und das Risiko einer Schädigung der Haut und anderer Weichteile erhöhen kann.

Und so geht's:

Öffnen Sie zunächst das Luftdruckventil am Kissen, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (s. Abbildung 1). Verbinden Sie dann den weißen Schlauch der Luftpumpe mit dem Luftdruckventil am Kissen (s. Abbildung 2).

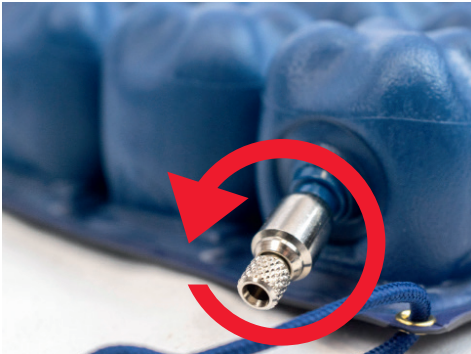


Abbildung 1: Luftdruckventil



Abbildung 2: Entfernen des Schaumstoffs

Blasen Sie das Kissen vollständig auf, bis alle Luftkammern komplett gefüllt sind. Drehen Sie nun das Luftdruckventil am Kissen im Uhrzeigersinn, um dieses zu verschließen und entfernen Sie den weißen Schlauch der Luftpumpe. Platzieren Sie nun das Kissen auf dem Sitz.

Setzen Sie sich nun auf das Kissen. Schieben Sie dann Ihre Hand zwischen das Kissen und das Gesäß an der knöchernsten Stelle (s. Abbildung 3).

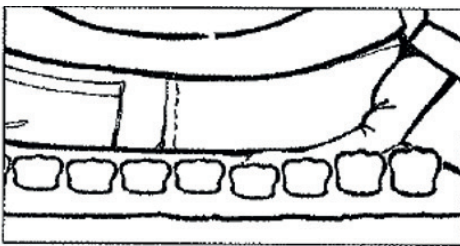


Abbildung 3: Überprüfen des Luftdrucks

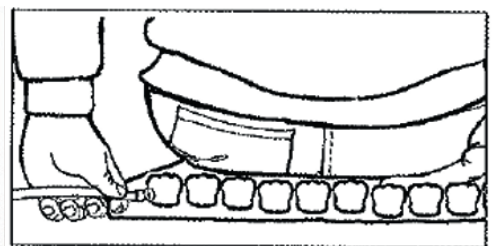


Abbildung 4: Verringern des Luftdrucks

Öffnen Sie das Luftdruckventil am Kissen langsam und beginnen Sie, Luft abzulassen (s. Abbildung 4). Schließen Sie das Kissenventil, wenn zwischen Gesäß und Kissen mindestens drei Fingerspitzen passen, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.

Reinigungs- und Waschanleitung:

Sitzkissen

Reinigen Sie das Kissen mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie hierzu Antiseptische Seife.

Trocknen Sie das Kissen, indem Sie ein leicht feuchtes Tuch verwenden. **VERWENDEN SIE KEINE WASCH- ODER ANDERE LÖSUNGSMITTEL.**

Waschen Sie das Kissen nicht in der Waschmaschine oder trocknen Sie es im Wäschetrockner.

Bitte verwenden Sie keine Hitze oder Dampf, um das Kissen zu trocknen.

Sitzkissenbezug

Waschen Sie den Sitzkissenbezug bei 30°C. Bitte bügeln Sie den Bezug nicht und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Aus hygienischen Gründen sollte jeder Kissenbezug nur für einen einzigen Patienten verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, einen neuen Bezug zu kaufen und anzubringen und das Kissen vor der Verwendung bei einem anderen Patienten gründlich mit antiseptischer Seife und Wasser zu reinigen.

Wir empfehlen Ihnen einen zweiten Kissenbezug zu erwerben, wenn der erste Bezug gewaschen wird, um einen direkten Kontakt mit der Oberfläche des Kissens zu verhindern.

Material

Sitzkissenbezug: Nylon, Polyurethane

Kissen:

PVC oder CR oder PU

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Fon 0 28 52 9 45 90-00

Fax 0 28 52 9 45 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 und 17:00 Uhr

Stand: September 2021 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

Hersteller:

Clearview Healthcare Co., Ltd.

384-10, Mado-ro MadoMyeon Hwaseong City,

Gyeonggi-Do,

KOREA



SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24
1076DE Amsterdam, Netherlands