

ergoflix

Akku-Druckknopf

Montageguide



ergoflix.de

Mit dem Akku-Druckknopf wird die Entnahme der Akkus Ihres ergoflix® L oder ergoflix ® Lplus Modells ganz leicht. Kurz auf den Push-Button drücken und schon können Sie die Akkus bequem entnehmen. In diesem Guide erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Akku-Druckknopf anbringen. Gut zu wissen: Für die Montage benötigen Sie kein Werkzeug.

Hinweise: Achten Sie bei den folgenden Schritten darauf, dass die einzelnen Komponenten nicht in die Fassung des Akkus fallen. Bitte gehen Sie behutsam mit den Einzelteilen um.

Und so geht's:

Entfernen Sie zunächst den Akku aus der Akkufassung (s. Abbildung 1 und 2).



Abbildung 1: Drücken des Akkuclips



Abbildung 2: Herausnehmen des Akkus

Führen Sie nun den Druckknopf in die Fassung ein, sodass dieser an der innenliegenden Seite der runden Aussparung liegt (s. Abbildung 3 und 4).



Abbildung 3: Einführen des Druckknopfs



Abbildung 4: Einlegen des Druckknopfs

Setzen Sie anschließend die Halterung von außen auf den Druckknopf und lassen diese spürbar einrasten (s. Abbildung 5 und 6).



Abbildung 5: Aufsetzen der Halterung



Abbildung 6: Eingerasteter Druckknopf

Drehen Sie den Druckknopf, wenn notwendig so, dass die Markierung parallel zur Akkufassung nach oben weist (s. Abbildung 4).



Abbildung 7: Drehen des Druckknopfs



Abbildung 8: Fertig montierter Druckknopf

Führen Sie den Akku nun wieder in die Akkufassung ein. Geschafft: Der Akku-Druckknopf ist montiert. Führen Sie die vorherigen Schritte auch für den übrigen Akku durch.



Abbildung 9: Akku einführen



Abbildung 10: Eingerasteter Akku mit Druckknopf

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Fon 0 28 52 9 45 90-00

Fax 0 28 52 9 45 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 und 17:00 Uhr

Besuchen Sie uns auf Social Media:



Stand: Mai 2022

Rechtliches: Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle Artikel ohne Deko. Die Namen der abgebildeten Personen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert. Die ergoflix Group GmbH ist Importeur gemäß des Medizinproduktegesetzes.