

Rollator- und Rollstuhlschloss AXA®

Montageanleitung



Mit dem Rollstuhlschloss kannst Du Deinen Rollstuhl schnell und zuverlässig sichern, egal ob im Treppenhaus oder draußen. Mit der praktischen Halterung hast Du es immer am Rahmen Deines ergoflix-Rollstuhls dabei.

Gut zu wissen: Du benötigst einen Inbusschlüssel der Größe 4.

Wir empfehlen bei allen ergoflix-Rollstühlen die Anbringung am oberen seitlichen Rückenlehnenrohr. Die Öffnung der Halterung, um das Schloss einzusetzen, sollte nach hinten zeigen, so dass es beim Falten des Rollstuhls zu keinen Problemen führt.

Die Schlosshalterung dient nur zum Aufbewahren oder Transport des Rollstuhlschlosses. Es bietet Dir keine Sicherheit, wenn Du Deinen Rollstuhl mit dem Schloss an einem externen Gegenstand (bspw. einer Straßenlaterne) befestigst, während es noch in der Halterung hängt. Entferne das Schloss aus der Halterung, um Deinen Rollstuhl zuverlässig zu sichern.

Und so geht's:

Nimm die Schlosshalterung zur Hand und setze den Inbusschlüssel an die Schraube an (s. Abb. 1). Löse die Schraube durch Drehen des Inbusschlüssels gegen den Uhrzeigersinn vollständig und lege sie danach zur Seite (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Ansetzen des Inbusschlüssels



Abbildung 2: Lösen der Schraube

Ziehe nun das Halterungskabel vollständig aus der Öffnung (s. Abb. 3) und lege die Schlosshalterung um den oberen seitlichen Rahmen Deiner Rückenlehne (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Rausziehen des Kabels



Abbildung 4: Befestigung am Rahmen

Führe das Kabel wieder in die seitliche Öffnung ein (s. Abb. 5) und ziehe es auf der gegenüberliegenden Seite so weit heraus, bis Du auf einen Widerstand stößt (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Einführen des Kabels



Abbildung 6: Festziehen der Halterung

Setze nun die Schraube wieder ein (s. Abb. 7) und ziehe diese mithilfe des Inbuschlüssels nach und nach mit dem Uhrzeigersinn fest (s. Abb. 8). Bitte achte darauf, die Schraube beim Festziehen nicht zu überdrehen, da sonst das Gewinde der Schraube Schaden nehmen könnte. Die Schlosshalterung sollte nun eng am Rollstuhlrahmen anliegen und nicht mehr nach links oder rechts verrutschen.



Abbildung 7: Einsetzen der Schraube



Abbildung 8: Festschrauben der Halterung

Nun kann das Rollstuhlschloss in die Halterung eingesetzt werden. Führe dazu das Schloss in die dafür vorgesehene Einkerbung (s. Abb. 9) und setze es vollständig ein, bis es sich nicht weiter runterschieben lässt (s. Abb. 10).



Abbildung 9: Einführen des Schlosses



Abbildung 10: Fertig eingesetztes Schloss

Das Rollstuhlschloss lässt sich einfach durch zwei Druckpunkte an der Schlosshalterung lösen (s. Abb. 11). Greife das Schloss von unten und drücke mit der anderen Hand gleichzeitig die beiden Druckpunkte an der Halterung, um das Schloss aus der Halterung nach unten hin zu entfernen (s. Abb. 12).



Abbildung 11: Druckpunkte der Halterung



Abbildung 12: Entfernen des Schlosses

Besonderheit beim ergoflix® heavy

Die Montage der Schlosshalterung erfolgt beim ergoflix® heavy genau wie bei allen anderen Rollstühlen. Das Halterungskabel passt sich an die jeweilige Form der Rohre Deines Rollstuhls an (s. Abb. 13).



Abbildung 13: Anbringung des Rollstuhlschlosses beim ergoflix® heavy

Das Rollstuhlschloss bietet eine automatische Abdeckung an der Schlüsselöffnung, um es vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen (s. Abb. 14). Die Schlüssel des Schlosses sind symmetrisch, was bedeutet, dass die Schlüssel keine Ober- und Unterseite haben und dementsprechend immer ins Schloss passen. Dies bietet Dir eine leichtere Handhabung (s. Abb. 15).



Abbildung 14: Schutzabdeckung



Abbildung 15: Einführen des Schlüssels

Dein Rollstuhlschloss ist nun einsatzbereit und kann verwendet werden.

Um eine sichere Nutzung des Schlosses zu gewährleisten, achte darauf, es nur am Rahmen Deines Rollstuhls anzubringen und nicht an abnehmbare Teile (z. B. das Bedienmodul).

Ziehe das Rollstuhlschloss durch den Rahmen Deiner Rückenlehne (s. Abb. 16) und verbinde das Kabel wieder mit der dafür vorgesehenen Öffnung, ein zusätzliches Abschließen des Schlosses mit dem Schlüssel ist nicht notwendig (s. Abb. 17). Der Rollstuhl ist nun gesichert.



Abbildung 16: Anbringung des Schlosses



Abbildung 17: Fertig montiertes Schloss

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000
Fax +49 (0) 2852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

Besuche uns auf Social Media



Telefonische Servicezeiten

März bis November:
montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr
Dezember bis Februar:
montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Stand: Dezember 2024 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

Hersteller/Fabricant:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui,
239400 CHINA



SUNGO Europe B. V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands