

# ergoflix

Fußstütze – verkürzt • Repose-pieds raccourci

Montageanleitung • Guide de montage



[ergoflix.de](http://ergoflix.de) | [ergoflix.fr](http://ergoflix.fr)

Mit der verkürzten Fußstütze lässt sich Dein ergoflix® heavy noch präziser auf Deine Körpermaße anpassen – für noch mehr Komfort bei jeder Fahrt.

**Gut zu wissen:** Du benötigst zwei Inbusschlüssel der Größe 5.

## Und so geht's:

Löse beide Schrauben der bereits montierten Fußstütze, indem Du mit einem Inbusschlüssel die Schraube löst und mit dem zweiten Inbusschlüssel konterst (s. Abb. 1). Entferne anschließend die Schraube, die Hülse und die Unterlegscheibe (s. Abb. 2) und wiederhole die Schritte auf der anderen Seite. Löse danach die Fußstütze vom Rollstuhl. Verwahre die entfernten Schrauben, Hülsen sowie Unterlegscheiben sorgfältig.



Abbildung 1: Lösen der Schraube



Abbildung 2: Lose Fußstütze

Löse jeweils die Schrauben der neuen Fußstütze (s. Abb. 3). Lege nun die neue, verkürzte Fußstütze an den Befestigungspunkten des Rollstuhlrahmens an. Führe zum Befestigen die Hülse jeweils von der Innenseite ein und platziere die Unterlegscheibe zwischen Durchgangsbohrung und Fußstütze (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Lösen der Schrauben



Abbildung 4: Einsetzen der Hülse und Unterlegscheibe

Setze anschließend die Schraube jeweils von der Außenseite ein und ziehe sie fest. Verwende wieder den Inbusschlüssel, um beim Festdrehen gehalten zu können (s. Abb. 5). Die Schraube sollte fest angezogen sein, damit sich die Fußstütze während der Fahrt nicht löst (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Festziehen der Schraube



Abbildung 6: Festgezogene Schraube

Die Fußstütze ist fertig montiert (s. Abb. 7).



Abbildung 7: Fertig montierte verkürzte Fußstütze

Avec le repose-pieds raccourci, votre ergoflix Heavy vous assure une position assise plus ergonomique, plus adaptée à votre taille, pour un confort accru à chaque trajet.

**Bon à savoir :** vous aurez besoin de deux clés Allen de taille 5.

## Et voici les étapes du montage :

Desserrez les deux vis du repose-pieds déjà monté en desserrant la vis avec une clé Allen tout en la maintenant avec la seconde clé Allen (voir fig. 1). Retirez ensuite la vis, la bague et la rondelle (voir fig. 2), puis répétez l'opération de l'autre côté. Détachez ensuite le repose-pieds du fauteuil roulant. Conservez soigneusement les vis, bagues et rondelles retirées.



Figure 1 : Desserrage de la vis



Figure 2 : Repose-pieds desserré

Desserrez les vis du nouveau repose-pieds raccourci (voir fig. 3). Positionnez ensuite le nouveau repose-pieds raccourci sur les points de fixation du cadre du fauteuil roulant. Pour le fixer, insérez la bague depuis l'intérieur et placez la rondelle entre le trou traversant et le repose-pieds (voir fig. 4).



Figure 3 : Desserrage des vis



Figure 4 : Insertion de la bague et de la rondelle

Insérez ensuite la vis depuis l'extérieur et serrez-la fermement. Utilisez de nouveau la clé Allen pour maintenir la vis pendant le serrage (voir fig. 5). La vis doit être solidement serrée afin que le repose-pieds ne se desserre pas pendant la conduite (voir fig. 6).



Figure 5 : Serrage de la vis



Figure 6 : Vis serrée

Le repose-pieds est maintenant complètement monté (voir fig. 7).



Figure 7 : Repose-pieds raccourci entièrement monté





## **ergoflix Group GmbH**

Marktstr. 20  
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

## **ergoflix France**

2 Rue Marcel Dassault  
69740 Genas

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

## **Telefonische Servicezeiten**

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

## **Horaires d'ouverture**

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



**Bitte beachte:** Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter [www.ergoflix.de](http://www.ergoflix.de).

**Remarque :** cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse [www.ergoflix.fr](http://www.ergoflix.fr).

Stand: Dezember 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: décembre 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.