

ergoflix

Bedienmodul-Adapter für Begleitpersonen

Bedienungsanleitung



ergoflix.de

Und so geht's:

Trennen Sie zunächst das Bedienmodulkabel von dem Anschlusskabel des Rollstuhls. Hierzu drehen Sie den Feststellring gegen den Uhrzeigersinn (s. Abbildung 1). Dies kann zu Anfang etwas Kraft erfordern.



Abbildung 1: Trennen des Bedienmodulkabels von dem Anschlusskabel des Rollstuhls

Lösen Sie nun das Bedienmodul mitsamt Gabel von der Armlehne: Dazu drehen Sie an der Feststellschraube (s. Abbildung 2). Das Bedienmodul wird dann an der Unterseite von der Gabel getrennt, indem die zwei Schrauben mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher gelöst werden (s. Abbildung 3).



Abbildung 2: Lösen des Bedienmoduls von der Armlehne



Abbildung 3: Lösen des Bedienmoduls von der Gabel

Schrauben Sie das Bedienmodul nun wie in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestellt mit den zuvor gelösten Schrauben wieder fest.



Abbildung 4: Positionierung der Gabel und des Bedienmoduls



Abbildung 5: Festschrauben des Bedienmoduls an der Gabel

Trennen Sie nun das Bedienmodulkabel von der Armlehne. Dafür benötigen Sie nicht mehr als einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (s. Abbildung 6). Anschließend fixieren Sie die Armlehne, indem Sie die Schraube wieder anbringen. Dazu lösen Sie die Schraube von dem Bedienmodulkabel (s. Abbildung 7) und schrauben diese anschließend wieder in die Armlehne (s. Abbildung 8). Achten Sie darauf, die Lasche auch zu fixieren, damit diese nicht verloren geht.



Abbildung 6: Lösen des Bedienmodulkabels von der Armlehne



Abbildung 7: Lösen der Schraube von dem Bedienmodulkabel



Abbildung 8: Fixieren der Armlehne mit Schraube und Lasche

Entfernen Sie anschließend den Bezug am Schiebebügel (s. Abbildung 9). Dieser ist mit einem Klettverschluss am Rollstuhl befestigt und kann einfach gelöst werden. Den Schaumstoff unter dem Bezug können Sie zur Seite schieben oder entfernen (s. Abbildung 10).



Abbildung 9: Entfernen des Bezugs



Abbildung 10: Entfernen des Schaumstoffs

Verbinden Sie nun die einzelnen Elemente des Adapters mit dem Gestell. Unser Tipp: Um Ihnen die Montage zu erleichtern, positionieren Sie die Elemente wie in Abbildung 11 dargestellt. Ziehen Sie die vier Schrauben mit Hilfe eines Inbusschlüssels leicht an, um den Adapter noch drehen zu können (s. Abbildung 12).



Abbildung 11: Anbringung des Adapters am Gestell



Abbildung 12: Leichtes Anziehen der Schrauben

Drehen Sie den Adapter nun so, dass das Aufsteckrohr nach hinten weist (s. Abbildung 13). Nun können Sie die Schrauben mit Hilfe eines Inbusschlüssels festziehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht verkanten. Sobald Sie alle Schrauben festgezogen haben, setzen Sie das Bedienmodul in den Adapter ein (s. Abbildung 14).



Abbildung 13: Finale Positionierung und Festschrauben des Adapters



Abbildung 14: Einsetzen des Bedienmoduls in das Aufsteckrohr des Adapters

Fixieren Sie das Bedienmodul nun durch Drehen der Feststellschraube (s. Abbildung 15).



Abbildung 15: Fixieren des Bedienmoduls am Adapter

Zum Schluss verknüpfen Sie nur noch das Kabel des Bedienmoduls mit dem zuvor gelösten Anschlusskabel (s. Abbildung 16). Drehen Sie den Feststeller im Uhrzeigersinn bis dieser spürbar einrastet.



Abbildung 16: Verbinden des Bedienmodulkabels mit dem Anschlusskabel

Geschafft: Bedienmodul und Adapter sind nun montiert (s. Abbildung 17). Wenn Sie mögen, können Sie nun noch Schaumstoff und Bezug wieder anbringen.



Abbildung 17: Bedienmodul mit Adapter am Rollstuhl

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Fon 0 28 52 9 45 90-00

Fax 0 28 52 9 45 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 und 17:00 Uhr

Stand: Dezember 2022 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.
Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben
sind Circa-Werte.

Hersteller:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui,
239400 CHINA



SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24
1076DE Amsterdam, Netherlands