

ergoflix

Rollstuhltasche hinten • Sac arrière pour fauteuil roulant
Montageanleitung • Guide de montage



ergoflix.de | ergoflix.fr

Mit der Rollstuhltasche hinten hast Du ausreichend Platz für Deine persönlichen Gegenstände und kleinere Einkäufe.

Gut zu wissen: Die Rollstuhltasche hinten ist mit wenigen Handgriffen sicher an Deinem Rollstuhl angebracht.

Und so geht's

Greife den Überzug und führe die Seite mit dem Mesh – ohne Rollstuhltasche – zwischen Schiebegriff und Rückenlehnenpolster hindurch (s. Abb. 1). Ziehe den Überzug anschließend über die Rückenlehne, bis die seitlichen Aussparungen passgenau an den Armlehngelenken sitzen (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Überziehen des Überzugs



Abbildung 2: Positionieren des Überzugs

Verbinde die Vorderseite des Überzugs auf beiden Seiten mithilfe der seitlichen Klettverschlüsse mit der Rückseite (s. Abb. 3). Achte darauf, den Bezug an der Ober- und Unterseite zu verschließen (s. Abb. 4). Prüfe anschließend die Sichtbarkeit Deines Rücklichts, indem Du sicherstellst, dass dieses nicht durch den Überzug verdeckt wird.

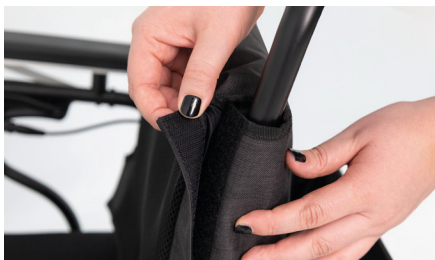


Abbildung 3: Verschließen des oberen Kletts



Abbildung 4: Verschließen des unteren Kletts

Um die Rollstuhltasche zu nutzen, greife an die äußeren Seiten (s. Abb. 5) und ziehe die Tasche zu Dir hin, um sie auseinanderzufalten (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Greifen der Rollstuhltasche



Abbildung 6: Auseinanderfalten der Rollstuhltasche

Die Rollstuhltasche bietet Dir nun genügend Stauraum (s. Abb. 7) und lässt sich mithilfe eines Kordelzugs sicher verschließen (s. Abb. 8).



Abbildung 7: Stauraum der Rollstuhltasche



Abbildung 8: Zuschnüren der Tasche

Solltest Du die Tasche nicht benötigen, kann diese durch Greifen unter die Rollstuhltasche und Drücken gegen die Rückenlehne, wieder zusammengefasst werden (s. Abb. 9). Die in der Tasche integrierten Magnete halten sie in gefaltetem Zustand.



Abbildung 9: Zusammenfalten der Rollstuhltasche

Bitte beachte die folgenden Warnhinweise:



Magnetisches Feld

Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.

- Halte Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.



Herzschrittmacher

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

- Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
- Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.
- Halte als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten.
- Warne Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.

Avec le sac arrière pour fauteuil roulant, vous disposez de suffisamment de place pour vos effets personnels et pour de petits achats.

Bon à savoir : Le sac arrière pour fauteuil roulant se fixe solidement à votre fauteuil roulant en quelques gestes seulement.

Et voici les étapes du montage :

Saisissez la housse et faites passer le côté en mesh – sans le sac pour fauteuil roulant – entre la poignée de poussée et le coussin du dossier (voir fig. 1).

Tirez ensuite la housse par-dessus le dossier jusqu'à ce que les découpes latérales soient correctement positionnées au niveau des articulations des accoudoirs (voir fig. 2).



Figure 1 : Mise en place de la housse



Figure 2 : Positionnement de la housse

Reliez la partie avant de la housse à la partie arrière des deux côtés à l'aide des fermetures auto-agrippantes latérales (voir fig. 3). Veillez à fermer la housse en haut et en bas (voir fig. 4). Vérifiez ensuite la visibilité de votre feu arrière en vous assurant qu'il n'est pas masqué par la housse.

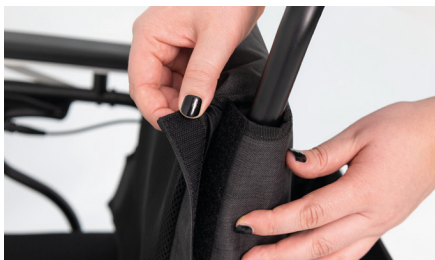


Figure 3 : Fermeture de la fixation auto-agrippante supérieure



Figure 4 : Fermeture de la fixation auto-agrippante inférieure

Pour utiliser le sac pour fauteuil roulant, saisissez les côtés extérieurs (voir fig. 5) et tirez le sac vers vous afin de le déplier (voir fig. 6).



Figure 5 : Saisie du sac pour fauteuil roulant



Figure 6 : Dépliage du sac pour fauteuil roulant

Le sac pour fauteuil roulant vous offre désormais un espace de rangement suffisant (voir fig. 7) et peut être fermé en toute sécurité à l'aide d'un cordon de serrage (voir fig. 8).



Figure 7 : Espace de rangement du sac pour fauteuil roulant



Figure 8 : Fermeture du sac par cordon de serrage

Si vous n'avez pas besoin du sac, vous pouvez le replier en saisissant la partie inférieure du sac pour fauteuil roulant et en le poussant contre le dossier (voir fig. 9). Les aimants intégrés dans le sac le maintiennent en position repliée.



Figure 9 : Pliage du sac pour fauteuil roulant

Veillez respecter les avertissements suivants :



Champ magnétique

Les aimants génèrent un champ magnétique puissant et de grande portée. Ils peuvent notamment endommager les téléviseurs et ordinateurs portables, les disques durs d'ordinateur, les cartes de crédit et cartes bancaires, les supports de données, les montres mécaniques, les appareils auditifs et les haut-parleurs.

- Tenez les aimants éloignés de tous les appareils et objets susceptibles d'être endommagés par des champs magnétiques puissants.



Stimulateur cardiaque

Les aimants peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

- Un stimulateur cardiaque peut passer en mode test et provoquer un malaise.
- Un défibrillateur peut, dans certains cas, ne plus fonctionner correctement.
- En tant que porteur de tels dispositifs, maintenez une distance suffisante par rapport aux aimants.
- Avertissez les porteurs de tels dispositifs de ne pas s'approcher des aimants.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France

2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Stand: Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Version: Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.



202601-13