

Trolleygriff • Poignée trolley noire

Montageanleitung • Guide de montage



Mit Hilfe des Trolleygriffs kannst Du den ergoflix wie einen Reisekoffer hinter Dir herziehen.

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe 2) und einen Ring-Maulschlüssel (Größe 8).

Und so geht's

Entferne zunächst das Sitzkissen des Rollstuhls. Löse die Klettverbindung der Sitzpolsterunterlage und lege die Schlaufen zur Seite (s. Abb. 1). Setze nun die mitgelieferten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher des Trolleygriffs ein und führe diesen unterhalb des Sitzrahmens ein (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Lösen der Klettverbindung



Abbildung 2: Positionieren des Trolleygriffs

Positioniere den Trolleygriff passend zu den Löchern im Rollstuhlrahmen und führe die Schrauben ein (s. Abb. 3). Nimm nun eine der im Paket beigelegten Muttern und drehe diese von oben um die Schraube (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Einsetzen der Schrauben



Abbildung 4: Anbringen der Muttern

Fixiere anschließend die Schraube, indem Du die Mutter mit dem Ring-Maulschlüssel festhältst und die Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher anziehst (s. Abb. 5). Wiederhole diese Schritte für die übrigen drei Schrauben sowie Muttern. Teste nun, ob der Trolleygriff fest sitzt und Du ihn einfach herausziehen kannst. Ziehe die Schlaufen wieder durch die Metallringe, um die Klettverbindung Deiner Sitzpolsterunterlage herzustellen (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Fixieren der Schrauben



Abbildung 6: Festziehen der Schlaufen

Achte darauf, den Stoff deiner Rückenlehne wieder an der Sitzpolsterunterlage zu befestigen (s. Abb. 7). Lege nun das Sitzkissen auf die Unterlage. Schon ist Dein ergoflix einsatzbereit und kann wie ein Reisekoffer gezogen werden (s. Abb. 8).



Abbildung 7: Befestigen des Rückenlehnenstoffs



Abbildung 8: Fertig montierter Trolleygriff

Bitte beachte, dass der Trolleygriff nicht als Tragegriff oder zum Anheben des Rollstuhls verwendet werden darf. Er ist ausschließlich zum Ziehen des Rollstuhls vorgesehen.

Grâce à la poignée trolley, vous pouvez tirer le fauteuil roulant ergoflix comme une valise derrière vous.

Bon à savoir : pour l'assemblage, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme (taille 2) et d'une clé à fourche (taille 8).

Voici les étapes pour le montage :

Retirez d'abord le coussin d'assise du fauteuil roulant. Détachez la fixation en velcro de la sous-couche du coussin et mettez les boucles de côté (voir fig. 1). Insérez maintenant les vis fournies dans les trous prévus à cet effet sur la poignée trolley et placez-la sous le cadre du siège (voir fig. 2).



Figure 1 : Détachement de la fixation en velcro



Figure 2 : Positionnement de la poignée trolley

Positionnez la poignée trolley de manière à aligner les trous avec le cadre du fauteuil roulant et insérez les vis (voir fig. 3). Prenez ensuite l'un des écrous fournis dans le paquet et vissez-le sur la vis par le dessus (voir fig. 4).



Figure 3 : Insertion des vis



Figure 4 : Installation des écrous

Fixez ensuite la vis en tenant l'écrou avec la clé à fourche et en serrant la vis avec le tournevis cruciforme (voir fig. 5). Répétez ces étapes pour les trois autres vis et écrous. Testez maintenant si la poignée trolley est bien fixée et si vous pouvez la retirer facilement. Passez à nouveau les boucles à travers les anneaux métalliques pour remettre la fixation en velcro de votre sous-coussin d'assise (voir fig. 6).



Figure 5 : Fixation des vis



Figure 6 : Serrage des boucles

Veillez à bien fixer à nouveau le tissu de votre dossier à la base d'assise (voir fig. 7). Placez ensuite le coussin d'assise à son emplacement. Votre fauteuil ergoflix est maintenant prêt à l'emploi et peut être tiré comme une valise (voir fig. 8).



Figure 7 : Fixation du tissu à la base d'assise



Figure 8 : Poignée trolley correctement installée

Veillez noter que la poignée trolley ne doit pas être utilisée pour soulever le fauteuil roulant, mais uniquement pour le tirer.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval
Batiment B3
69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Juni 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: juin 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.