

Flaschenhalter • Porte-bouteille

Montageanleitung • Guide de montage



Der Flaschenhalter wird am Rahmengestell befestigt und bietet Dir Platz für Dein Lieblingsgetränk. Durch die Einstellungsmöglichkeiten kannst Du Flaschen unterschiedlicher Größe in den Flaschenhalter einsetzen.

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage den mitgelieferten Inbusschlüssel.

Und so geht's

Lege die Schelle um das Rückenlehnenrohr Deines Rollstuhls (s. Abb. 1). Setze die beiden längsten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher und ziehe die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest (s. Abb. 2).

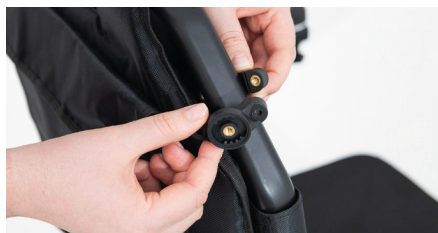


Abbildung 1: Anlegen der Schelle



Abbildung 2: Festziehen der Schrauben

Achte darauf, die Schrauben abwechselnd festzuziehen, um ein Verkanten zu vermeiden. Ziehe die Schrauben fest, sodass die Schelle nicht mehr verrutscht (s. Abb. 3). Nimm die Halterung zur Hand und setze die einzelne mittelgroße Schraube in die Öffnung ein (s. Abb. 4). Die Schraube liegt lose in der Öffnung.



Abbildung 3: Festgezogene Schelle



Abbildung 4: Einsetzen der Schraube

Setze den Flaschenhalter mit der Rückseite an die Halterung an (s. Abb. 5). Achte darauf, dass die Löcher (1-3) durch die Aussparungen sichtbar bleiben (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Ansetzen des Flaschenhalters



Abbildung 6: Schraublöcher

Setze die beiden kleinen Schrauben in die Löcher ein (s. Abb. 7) und ziehe diese fest, um den Flaschenhalter zu fixieren (s. Abb. 8). Der Flaschenhalter kann nun an die Schelle am Rollstuhlrahmen angebracht werden.



Abbildung 7: Einsetzen der Schrauben



Abbildung 8: Festziehen der Schrauben

Achte beim Ansetzen auf die Rastnasen der Halterung und der angebrachten Schelle (s. Abb. 9). Richte den Flaschenhalter möglichst senkrecht aus und ziehe die Schraube in der Mitte fest, um den Flaschenhalter zu montieren (s. Abb. 10).



Abbildung 9: Rastnasen



Abbildung 10: Montage des Flaschenhalters

Der Flaschenhalter ist nun einsatzbereit (s. Abb. 11). Mithilfe eines Druckknopfs am Boden kann der Durchmesser des Flaschenhalters vergrößert oder verkleinert werden. Drücke dafür auf den Knopf und ziehe gleichzeitig an der vorderen Hälfte des Flaschenhalters (s. Abb. 12).



Abbildung 11: Fertig montierter Flaschenhalter



Abbildung 12: Einstellen des Durchmessers

Um Feinjustierungen vorzunehmen, kannst Du am silbernen Rädchen drehen. So kannst Du ebenfalls den Durchmesser des Flaschenhalters anpassen (s. Abb. 13). Die Flasche sitzt nun fest im Flaschenhalter (s. Abb. 14).



Abbildung 13: Drehen am Rädchen



Abbildung 14: Fertig eingesetzte Flasche

Le porte-bouteille se fixe sur le cadre et offre un espace pour votre boisson préférée. Grâce aux options de réglage, vous pouvez y insérer des bouteilles de différentes tailles ou des gobelets.

Bon à savoir : Vous aurez besoin de la clé Allen fournie pour l'installation.

Voici les étapes pour le montage

Placez la bride autour du tube du dossier de votre fauteuil roulant (voir Fig. 1). Insérez les deux vis les plus longues dans les trous prévus à cet effet et serrez-les à l'aide de la clé Allen (voir Fig. 2).

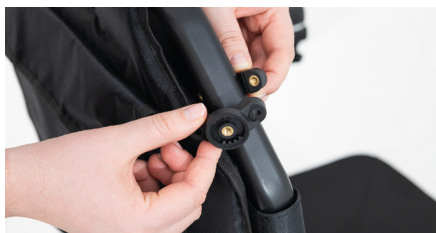


Figure 1 : Mise en place de la bride



Figure 2 : Serrage des vis

Veillez à serrer les vis de manière alternée pour éviter tout désalignement. Serrez les vis fermement afin que la bride ne glisse plus (voir Fig. 3). Prenez le support et insérez la vis de taille moyenne dans l'ouverture prévue (voir Fig. 4). La vis doit rester libre dans l'ouverture.



Figure 3 : Bride serrée



Figure 4 : Insertion de la vis

Placez le porte-bouteille avec son dos contre le support (voir Fig. 5). Assurez-vous que les trous (1-3) restent visibles à travers l'encoche (voir Fig. 6).



Figure 5 : Positionnement du porte-bouteille



Figure 6 : Trous de vis

Insérez les deux petites vis dans les trous (voir Fig. 7) et serrez-les pour fixer le porte-bouteille (voir Fig. 8). Le porte-bouteille peut maintenant être attaché à la bride sur le cadre du fauteuil roulant.



Figure 7 : Insertion des vis



Figure 8 : Serrage des vis

Lors de la mise en place, veillez à aligner les encoches de la fixation et de la bride installée (voir Fig. 9). Alignez le porte-bouteille aussi verticalement que possible et serrez la vis centrale pour monter le porte-bouteille (voir Fig. 10).



Figure 9 : Encoches



Figure 10 : Montage du porte-bouteille

Le porte-bouteille est maintenant prêt à l'emploi (voir Fig. 11). Grâce à un bouton-poussoir situé sur la partie basse, la largeur du porte-bouteille peut être agrandie ou réduite. Pour ce faire, appuyez sur le bouton et tirez simultanément sur la partie avant du porte-bouteille (voir Fig. 12).



Figure 11 : Porte-bouteille monté



Figure 12 : Réglage de la largeur

Pour effectuer des ajustements fins, vous pouvez tourner la molette argentée. Cela vous permet également d'ajuster la largeur du porte-bouteille (voir Fig. 13). La bouteille est maintenant solidement fixée dans le porte-bouteille (voir Fig. 14).



Figure 13: Rotation de la molette



Figure 14: Bouteille correctement installée

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval
Batiment B3
69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Februar 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: Février 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.