

ergoflix

Transporttasche • Housse de transport

Montageanleitung • Guide de montage



ergoflix.de | ergoflix.fr

Dank der Transporttasche kannst Du Deinen Rollstuhl sicher transportieren. Die Tasche besteht aus einem robusten, reißfesten Material und ermöglicht Deinem Rollstuhl einen optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen.

Gut zu wissen: Die Tasche bietet sich vor allem für Flugreisen an und gewährleistet sicheres Verstauen.

Und so geht's

Entferne das Bedienmodul sowie das Sitzkissen von Deinem ergoflix® Rollstuhl und falte diesen zusammen. Nimm die Transporttasche zur Hand und stülpe sie mit dem offenen Ende über Deinen Rollstuhl (s. Abb. 1). Achte darauf, dass sich die Lasche (1) mit den drei Klettfeldern an der Unterseite des Rollstuhls befindet (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Überstülpen der Tasche



Abbildung 2: Lasche mit drei Klettfeldern

Klappe die Lasche (1) um und schiebe sie unter Deinen Rollstuhl durch auf die andere Seite (s. Abb. 3). Ziehe die Lasche (1) anschließend komplett unter dem Gestell hervor (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Umklappen der Lasche



Abbildung 4: Hervorziehen der Lasche

Drücke den Stoff (2) mit der einen Hand zum Rollstuhl und hebe die Lasche (1) mit der anderen Hand an, um diese mit dem Klett zu befestigen (s. Abb. 5). Achte darauf, dass die Lasche (1) fest genug sitzt (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Platzierung der Lasche



Abbildung 6: Anbringung am Klett

Lege anschließend die obere Stofflasche (3) über die Klettverbindung (s. Abb. 7). Die Transporttasche ist nun montiert (s. Abb. 8) und der Rollstuhl bereit zum Transportieren (s. Abb. 9).



Abbildung 7: Überlappen des Stoffes



Abbildung 8: Fertig montierte Transporttasche



Abbildung 9: Transportieren des Rollstuhls

Grâce à la housse de transport, vous pouvez transporter votre fauteuil roulant en toute sécurité. La housse est fabriquée dans un matériau robuste et résistant aux déchirures, offrant ainsi une protection optimale contre les chocs et les intempéries

Bon à savoir : cette housse est particulièrement adaptée aux voyages en avion et garantit un rangement sécurisé.

Voici les étapes pour le montage

Pour commencer, retirez le module de commande ainsi que le coussin de siège de votre fauteuil roulant ergoflix et pliez-le. Ensuite, prenez la housse de transport et enfillez-la par l'extrémité ouverte sur votre fauteuil roulant (voir Fig.1). Assurez-vous que le rabat (1) avec les trois bandes velcro se trouve sous le fauteuil roulant (voir Fig. 2).



Figure 1 : Enfilage de la housse



Figure 2 : Rabat avec trois bandes velcro

Repliez le rabat (1) et faites-le passer sous votre fauteuil roulant jusqu'à l'autre côté (voir Fig. 3). Enfin, tirez complètement le rabat (1) sous le châssis (voir Fig. 4).



Figure 3 : Repli du rabat



Figure 4 : Tirage du rabat

Appuyez sur le tissu (2) contre le fauteuil roulant avec une main et soulevez le rabat (1) avec l'autre main pour le fixer avec le velcro (voir Fig. 5). Assurez-vous que le rabat (1) est bien en place (voir Fig. 6).



Figure 5 : Placement du rabat



Figure 6 : Fixation avec le velcro

Ensuite, placez le rabat supérieur en tissu (3) sur la fixation velcro (voir Fig. 7). La housse de transport est maintenant installée (voir Fig. 8) et le fauteuil roulant est prêt à être transporté (voir Fig. 9).



Figure 7 : Superposition du tissu



Figure 8 : Housse de transport montée



Figure 9 : Utilisation de la housse pour le transport du fauteuil roulant

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval

Batiment B3

69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Socail Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Januar 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte.

Version: Januar 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés. Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives.

Hersteller/Fabricant:

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.
No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou
Anhui Province, Anhui,
239400 CHINA



SUNGO Europe B. V.
Fascinato Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands