

Sitzbreitenerweiterung • Extensions d'assise

Montageanleitung • Guide de montage



Die Sitzbreite des Rollstuhls kann optional von 48 cm auf 56 cm erweitert werden. Dazu wird die Sitzbreitenerweiterung einfach am Rollstuhl angebracht. Erfahre in dieser Anleitung, wie das geht!

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage einen Inbusschlüssel der Größe 5. Solltest Du einen ergoflix® LX mit separat angebrachtem Lichtdruckknopf besitzen, benötigst Du außerdem einen Inbusschlüssel der Größe 3.

Und so geht's

Entferne zunächst das vorhandene Bedienmodul, indem Du das Rädchen am Verbindungsstück lockerst und die Stecker auseinanderziehst (s. Abb. 1). Entferne die beiden Klettbander vom Lichtkabel (**1-2**) und nimm das Bedienmodulkabel aus den Haken (**3-4**) heraus (s. Abb. 2).



Abbildung 1: Trennen des Kabels



Abbildung 2: Lösen der Kabel

Löse die Feststellschraube, um das Bedienmodul zu entfernen (s. Abb. 3). Schraube – sofern vorhanden – den separat angebrachten Lichtdruckknopf mit Hilfe des Inbusschlüssels in Größe 3 ab (s. Abb. 4) und lege diesen auf der Sitzfläche ab.



Abbildung 3: Entfernen des Bedienmoduls



Abbildung 4: Lösen des Lichtdruckknopfs

Verwende nun den Inbusschlüssel der Größe 5, um die beiden Schrauben der Armlehne zu lösen (s. Abb. 5) und ziehe anschließend die gelöste Armlehne zu Dir. Achte darauf, dass die beiden schwarzen Lager am Sitz montiert bleiben (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Lösen der Schrauben



Abbildung 6: Gelöste Armlehne

Stecke nun die lange Hülse auf die Halterung an der Rückenlehne und die kurze Hülse auf die Halterung am Sitz (s. Abb. 7). Anschließend wird die Armlehne auf beide Halterungen gesetzt und mit den mitgelieferten, längeren Schrauben montiert (s. Abb. 8). Achte darauf, die Schrauben nur so festzuziehen, dass ein Abschwenken der Armlehnen nach oben und damit ein seitlicher Einstieg in Deinen Rollstuhl weiterhin möglich ist.



Abbildung 7: Anbringen der Hülsen



Abbildung 8: Festziehen der Schraube

Wiederhole den Vorgang für die übrige Seite und montiere im Anschluss wieder beide Kabel sowie den Lichtdruckknopf am Rollstuhl. Die Sitzbreite des Rollstuhls wurde erweitert (s. Abb. 9).



Abbildung 9: Fertig montierte Sitzbreitenerweiterung

La largeur entre-accoudoir de votre fauteuil roulant peut être étendue de 48 cm à 56 cm grâce aux extensions d'assise, qui se fixent facilement sur le fauteuil. Ce guide vous explique pas à pas comment procéder.

Bon à savoir : Pour l'installation, vous aurez besoin d'une clé Allen de taille 5. Si votre ergoflix LX est équipé d'un bouton de commande d'éclairage monté séparément, vous aurez également besoin d'une clé Allen de taille 3.

Voici les étapes pour le montage :

Commencez par retirer le module de commande existant en desserrant la molette sur la pièce de connexion, puis en débranchant les connecteurs (voir fig. 1). Retirez ensuite les deux bandes velcro qui maintiennent le câble d'éclairage (**1-2**), puis sortez le câble du module de commande des crochets (**3-4**) (voir fig. 2).



Figure 1 : Débranchement du câble



Figure 2 : Libération des câbles

Desserez la vis de fixation afin de retirer le module de commande (voir fig. 3). Si votre fauteuil est équipé d'un bouton de commande d'éclairage monté séparément, dévissez-le à l'aide d'une clé Allen de taille 3 (voir fig. 4) et posez-le ensuite sur l'assise.



Figure 3 : Retrait du module de commande



Figure 4 : Démontage du bouton d'éclairage

Utilisez maintenant la clé Allen de taille 5 pour desserrer les deux vis de l'accoudoir (voir fig. 5), puis tirez l'accoudoir ainsi libéré vers vous. Veillez à ce que les deux supports noirs restent bien fixés sur l'assise (voir fig. 6).



Figure 5 : Desserrage des vis

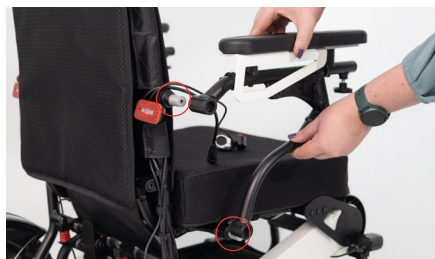


Figure 6 : Accoudoir desserré

Placez maintenant la longue douille sur le support du dossier et la courte douille sur le support de l'assise (voir fig. 7). Ensuite, positionnez l'accoudoir sur les deux supports et fixez-le à l'aide des vis plus longues fournies (voir fig. 8). Veillez à ne pas trop serrer les vis afin de permettre à l'accoudoir de pivoter vers le haut. Cela garantit un accès latéral à votre fauteuil roulant.



Figure 7 : Pose des douilles



Figure 8 : Serrage de la vis

Répétez l'opération pour l'autre côté, puis rebranchez les deux câbles ainsi que le bouton d'éclairage sur le fauteuil roulant.

La largeur d'assise de votre fauteuil roulant est maintenant augmentée (voir fig. 9).



Figure 9 : Extensions d'assise montées

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval
Batiment B3
69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Juli 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: juillet 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.