

ergoflix

Flaschenhalter • Porte-bouteille

Montageanleitung • Guide de montage



ergoflix.de | ergoflix.fr

Der Flaschenhalter wird an der Rückenlehne Deines ergoflix befestigt und bietet Dir die Möglichkeit, Dein Getränk während der Fahrt immer griffbereit zu haben.

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage kein Werkzeug.

Und so geht's

Nimm den Flaschenhalter und die Gummipuffer zur Hand (s. Abb. 1). Ziehe die Schutzfolie ab, setze die Klebefläche in die Innenseite der Schelle vom Flaschenhalter und klebe die Gummipuffer fest (s. Abb. 2).

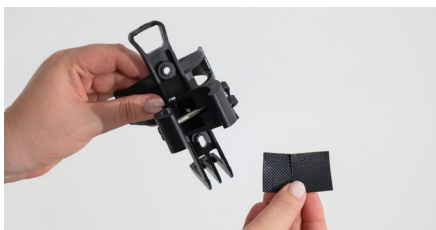


Abbildung 1: Flaschenhalter und Gummipuffer



Abbildung 2: Festkleben der Gummipuffer

Setze den Flaschenhalter mit der Schelle zum Rollstuhlrahmen an Deine Rückenlehne an (s. Abb. 3). Drücke nun die Schelle zusammen, um den Flaschenhalter an der gewählten Stelle anbringen zu können (s. Abb. 4).



Abbildung 3: Ansetzen des Flaschenhalters



Abbildung 4: Festdrücken der Schelle

Drehe an der Klemme, um die Schelle zu verschrauben und den Flaschenhalter zu fixieren (s. Abb. 5). Achte darauf, die Klemme soweit zu drehen, bis sie sich noch parallel zur Schelle hin einklappen lässt (s. Abb. 6).



Abbildung 5: Festdrehen des Flaschenhalters



Abbildung 6: Umklappen der Klemme

Der Flaschenhalter sollte nun fest an Deinem Rollstuhlrahmen sitzen und nicht verrutschen. Der Flaschenhalter ist fertig montiert (s. Abb. 7).



Abbildung 7: Fertig montierter Flaschenhalter

Le porte-bouteille se fixe à l'appui-tête de votre fauteuil roulant ergoflix et vous permet d'avoir votre boisson toujours à portée de main pendant le trajet.

Bon à savoir : Vous n'avez pas besoin d'outils pour l'installation.

Voici les étapes du montage

Prenez le porte-bouteille et les plaquettes en caoutchouc (voir Fig. 1). Retirez le film protecteur, placez la surface adhésive à l'intérieur du collier du porte-bouteille et fixez les tampons en caoutchouc (voir Fig. 2).

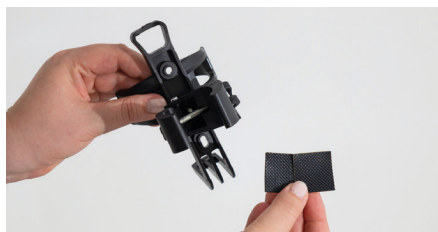


Figure 1 : Porte-bouteille et plaquettes en caoutchouc



Figure 2 : Fixation des plaquettes en caoutchouc

Placez le porte-bouteille avec le collier vers le cadre du fauteuil roulant contre son dossier (voir Fig. 3). Appuyez ensuite sur le collier pour pouvoir fixer le porte-bouteille à l'endroit choisi (voir Fig. 4).



Figure 3 : Positionnement du porte-bouteille



Figure 4 : Pression sur le collier

Tournez la pince pour visser le collier et fixer le porte-bouteille (voir Fig. 5). Assurez-vous de tourner la pince jusqu'à ce qu'elle puisse encore se replier parallèlement au collier (voir Fig. 6)



Figure 5 : Serrage du porte-bouteille

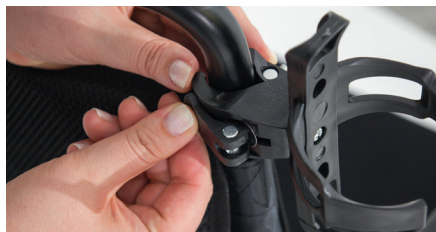


Figure 6 : Repli de la pince

Le porte-bouteille doit maintenant être solidement fixé au cadre de votre fauteuil roulant et ne pas glisser. Le porte-bouteille est maintenant complètement monté (voir Fig. 7).



Figure 7 : Porte-bouteille complètement monté

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon +49 (0) 2852 9459000

Fax +49 (0) 2852 9459099

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

ergoflix France SAS

6 rue d'Arsonval
Batiment B3
69680 Chassieu

Tél. +33 4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr

www.ergoflix.fr

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media • Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Stand: Februar 2025 | Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung, Irrtum vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Version: Février 2025 | Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.