

Kippschutzräder - für Modelle bis Ende 2020

Montageanleitung



Für die Montage der Kippschutzräder benötigen Sie je nach Seriennummer Ihres Rollstuhls einen Inbusschlüssel der Größe 5 (bzw. Größe 4). Diesen finden Sie in der Zubehörtasche Ihres Rollstuhls.

Gut zu wissen: Optional kann die Montage bei einem Fachhandelspartner oder durch den ergoflix-Kundenservice gegen Aufpreis beauftragt werden.

Und so geht's:

Lösen Sie zunächst die drei Schrauben, welche sich auf der Innen- und Außen- seite des rechten Motorblocks befinden, mit dem Inbusschlüssel (s. Abbildung 1 und 2) und verwahren Sie die Schrauben.

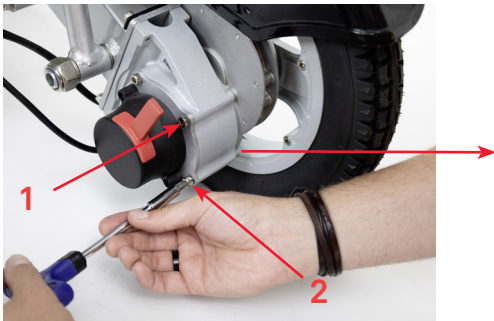


Abbildung 1: Lösen der Schrauben



Abbildung 2: Schraube an Innenseite (3)

Setzen Sie den Kippschutz für die rechte Seite auf die Schraublöcher (s. Abbildung 3). Führen Sie in das obere Schraubloch anstelle der zuvor demon- tierten Schraube nun die mitgelieferte lange Schraube ein und ziehen diese mit Hilfe des Inbusschlüssels an (s. Abbildung 4).



Abbildung 3: Aufsetzen des Kippschutzes

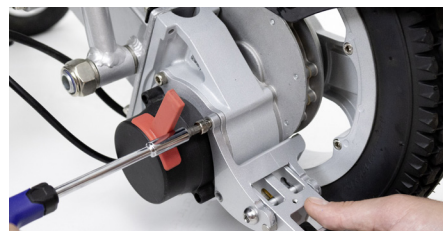


Abbildung 4: Anziehen der oberen Schraube

Nun setzen Sie die beiden mitgelieferten kurzen Schrauben in die unteren Schraublöcher ein und drehen diese mit dem Inbusschlüssel ebenfalls fest (s. Abbildung 5).



Abbildung 5: Anziehen der unteren Schraube



Abbildung 6: Fertig montierter Kippschutz

Wiederholen Sie den kompletten Vorgang anschließend für die übrige Seite.



WARNUNG

Beschädigung der Rückenlehne bei starker Gewichtsbelastung

Vermeiden Sie eine starke Belastung der Rückenlehne des Rollstuhls durch ein erhöhtes Gewicht.

Achten Sie bei gefüllten Taschen und Rucksäcken darauf, dass diese nicht mehr als 5 kg Gewicht haben.

Eine zu schwere Gewichtsbelastung kann die Rückenlehne ernsthaft verformen und beschädigen.

ergoflix Group GmbH

Marktstr. 20
46499 Hamminkeln

Fon 02852 94590-00

Fax 02852 94590-99

info@ergoflix.de

www.ergoflix.de

Öffnungszeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 und 17:00 Uhr

Besuchen Sie uns auf Social Media:



Stand: August 2022

Rechtliches: Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle Artikel ohne Deko. Die ergoflix Group GmbH ist Importeur gemäß des Medizinproduktegesetzes.